

## Arthronet®-Instrumente

### **Sind entwickelt und konstruiert für das Entfernen von Gewebe in Gelenkinnenräumen**

Sie sind in ihrer Form und Oberfläche atraumatisch für die Führung am Gelenksknorpel gestaltet. Des Weiteren sind sie im Handgriff mit einem Überlastmechanismus ausgestattet, welche einen Bruch im invasiven Bereich, im Falle einer extremen Überbelastung, verhindert. Sie sind mit Hilfe der bekannten Sterilisationsverfahren sterilisierbar.

#### **Arthronet®-Instrumente sind nur dann zu verwenden wenn:**

1. Die Funktion des gesamten Instruments gegeben ist.
2. Die Faß- bzw. Schneidleistung noch ausreichend ist.
3. Keine mechanische Beschädigung vorliegt.
4. Vor der Verwendung ein geeignetes Reinigungs- und Sterilisationsverfahren angewendet wurde.

#### **Warnhinweis!**

**Arthronet®-Instrumente sind nicht zu verwenden und umgehend auszutauschen wenn:**

1. Ein mechanischer Defekt vorliegt.
2. Eine ausreichende Faß- bzw. Schneidleistung nicht mehr gegeben ist.
3. Keine geeignete Reinigung und Sterilisation vorab erfolgen kann.

**Bei mechanischen Beschädigungen der Instrumente auch während der Anwendung, sind diese umgehend auszutauschen.**

**Arthronet®-Instrumente sollen grundsätzlich nur von fachlich qualifiziertem Personal benutzt und sterilisiert werden ! Um die ordnungsgemäße Funktion und eine Leichtgängigkeit zu gewährleisten, sollten die Instrumente mindestens einmal wöchentlich mit Instrumentöl behandelt werden.**

#### **Mögliche nachteilige Auswirkungen**

- Infektionen bei nicht ordnungsgemäßer Sterilisation.
- Komplikationen bedingt durch das Benutzen mechanisch defekter Instrumente.

**Verantwortlich für die Validierung des Sterilisationsverfahrens** und damit für die Sterilität der behandelten Produkte ist der Betreiber des Sterilisators.

**Kennzeichnung:** Die Instrumente sind mit einer Seriennummer gekennzeichnet.

Arthronet® Germany Ltd. & Co. KG  
Geilenbacher Straße 31  
D-51399 Burscheid  
Tel. 02174-7655-0  
Fax 02174-7655-55  
e-Mail: [service@arthronet.de](mailto:service@arthronet.de)

