

arthronet®-Saugpunch

Ist entwickelt und konstruiert für das Entfernen von Gewebe in Gelenkinnenräumen.

Ist bedingt durch seine Form ideal im Vorderhornbereich einsetzbar. Die Schneidöffnung läßt sich je nach Bedarf in 45° Schritten um 360° drehen. Er ist zerlegbar und mit Hilfe der bekannten Sterilisationsverfahren sterilisierbar. Der Saugpunch kann mit Klingen in drei verschiedenen Durchmessern (3,5 – 4,5 – 5,5mm) benutzt werden.

Der arthronet®-Saugpunch ist nur dann zu verwenden wenn:

1. Die Funktion des gesamten Instruments gegeben ist.
2. Die Schneidleistung noch ausreichend ist.
3. Keine mechanische Beschädigung vorliegt
4. Vor der Verwendung ein geeignetes Reinigungs- und Sterilisationsverfahren angewendet wurde.

Warnhinweis!

Der arthronet®-Saugpunch ist nicht zu verwenden und umgehend auszutauschen wenn:

1. Ein mechanischer Defekt vorliegt.
2. Eine ausreichende Schneidleistung nicht mehr gegeben ist.
3. Keine geeignete Reinigung und Sterilisation vorab erfolgen kann.

Bei mechanischen Beschädigungen des Saugpunches auch während der Anwendung, ist dieser umgehend auszutauschen.

Der arthronet®-Saugpunch soll grundsätzlich nur von fachlich qualifiziertem Personal benutzt und sterilisiert werden !

Mögliche nachteilige Auswirkungen

- Infektionen bei nicht ordnungsgemäßer Sterilisation
- Komplikationen bedingt durch das Benutzen eines mechanisch defekten Saugpunches

Verantwortlich für die Validierung des Sterilisationsverfahrens und damit für die Sterilität der behandelten Produkte ist der Betreiber des Sterilisators.

Kennzeichnung: Der Saugpunch ist mit einer Seriennummer gekennzeichnet. Die Klingen tragen eine Chargennummer und die letzten vier Ziffern der Artikelnummer.

arthronet® Germany Ltd. & Co. KG
Geilenbacher Straße 31
D-51399 Burscheid
Tel: (**49) - 02174-76550
Fax: (**49) - 02174-7655-55
e-Mail: service@arthronet.de

